

Dolo-Arthrosenex® M Salbe

Medizinprodukt zur Massagehilfe bei physiotherapeutischen Behandlungen

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Anwendungszweck

Dolo-Arthrosenex® M Salbe dient auf unverletzter Haut als Gleitmittel zur Unterstützung der Massage bei der physiotherapeutischen und prophylaktischen Behandlung des Muskel-, Sehnen- und Gelenksystems.

Der physikalische Gleiteffekt der Salbe unterstützt dabei die flüssige und effektive Ausführung der Knet-, Reibe- und Streichgriffe. Gleitfähigkeit und Geschmeidigkeit der Massagebewegungen werden verbessert, eine tiefere Entspannung und Lockerung der Muskulatur ermöglicht.

2. Anwendungsgebiete

Dolo-Arthrosenex® M Salbe wird als Hilfsmittel bei der therapeutischen Massage auf unverletzter Haut regional angewendet bei Sportverletzungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthrose, Hüftgelenkschmerzen, Myalgien, Nachbehandlung von Muskelverletzungen, rheumatischen Beschwerden, Bandscheibenbeschwerden, Ischias, Muskelverspannungen, Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen.

Auch für die prophylaktische Massage zur Vorbereitung der Muskulatur auf starke sportliche Belastungen sowie während und nach sportlicher Betätigung zur Lockerung, Entkrampfung und Entmüdung ist der Einsatz von *Dolo-Arthrosenex® M Salbe* bestens geeignet.

Das Produkt ist sowohl für die Selbstanwendung von Erwachsenen im häuslichen Umfeld, als auch für die professionelle Fremdanwendung an Kranken, Behinderten und Senioren nutzbar. Die Fremdanwendung an Kindern (älter als 6 Jahre) ist nur Erwachsenen vorbehalten.

3. Nebenwirkungen, Gewebeerträglichkeit

Die Anwendung von *Dolo-Arthrosenex® M Salbe* kann in seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen. Diese äußern sich im Auftreten von lokalen Reizreaktionen, Knötchen- und Bläschenbildung, meist mit Juckreiz verbunden. In Einzelfällen können schwere Verlaufsformen von Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom) auftreten.

4. Gegenanzeigen

Dolo-Arthrosenex® M Salbe darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, insbesondere gegenüber den Abkömmlingen der Salicylsäure. Das Produkt darf nicht auf entzündeter, verletzter Haut, Ekzemen oder Schuppenflechte am Applikationsort angewendet werden.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dolo-Arthrosenex® M Salbe ist nur zur äußerlichen Anwendung auf unversehrter Haut bestimmt, darf nicht durch Einnahme, Injektion oder Infusion in den Körper und nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder offene Wunden gelangen.

Achtung:

Dolo-Arthrosenex® M Salbe darf ausschließlich von Erwachsenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren sowie bei Schwangeren und Stillenden ist ausgeschlossen. Ebenso ist die Anwendung von *Dolo-Arthrosenex® M Salbe* nicht bei Patienten mit gleichzeitiger Erkrankung der Nieren, der Leber, des Magen-Darm-Traktes, der Atemwege, bei Asthma oder Vorliegen von Allergien gestattet.

Achtung:

Nach dem Auftragen sind die Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen.

Achtung:

Vor der Entnahme von *Dolo-Arthrosenex® M Salbe* aus der Packung ist diese auf Unversehrtheit zu prüfen.

Achtung:

Für Kinder unzugänglich und sicher aufbewahren!

6. Produkteigenschaften

Dolo-Arthrosenex® M Salbe verleiht der Haut eine gute Gleitfähigkeit und Geschmeidigkeit bei der Anwendung der Massagetechnik. Der physikalische Gleiteffekt der Salbe unterstützt

dabei die flüssige und effektive Ausführung der Knet-, Reibe- und Streichgriffe. Verbesserte Gleitfähigkeit und Geschmeidigkeit ermöglichen eine tiefe Entspannung und Lockerung der Muskulatur.

Das Produkt enthält Salicylsäure in geringer Konzentration als Konservierungsmittel.

7. Produktanwendung

Massage ist eine weit verbreitete physikalische Form der Schmerzbehandlung, die man teils in Selbstanwendung an sich ausführen kann. Variantenreiche Techniken reichen von starkem Druck bis zur sanften Berührung und schwanken zwischen Streichungen, Knetungen, Reibungen, Klopfungen und Vibrationen. Die klassische Massage wird zur besseren Durchblutung, Lockerung, Dehnung und Entkrampfung der Muskulatur eingesetzt. Die Haut wird durchblutet, Bänder und Sehnen werden elastischer (ähnlich wie nach einem kurzen Aufwärmtraining), die Glieder bzw. Gelenke werden gelockert und schmerzhafte Verspannungen werden gelöst.

Dolo-Arthrosenex® M Salbe wird bei Bedarf 2-3-mal täglich in dünner Schicht über die Schmerzzone hinaus aufgetragen und einmassiert.

Die kurzzeitige Anwendung kann bis zum Abklingen der Beschwerden erfolgen, sollte eine zusammenhängende maximale Anwendungsdauer von 4 Wochen jedoch nicht überschreiten.

Nach der Entnahme des Produkts aus der Tube, diese wieder fest verschließen und nach der Behandlung die Hände gründlich waschen!

Die verbrauchte Tube und Faltschachtel sind über den Hausmüll, vorzugsweise getrennt, zu entsorgen.

8. Physikalische Produktdaten

Zusammensetzung:

Gereinigtes Wasser, Cetylstearylalkohol, Natriumcetylstearylsulfat, nichtionogener Emulgator, mittelkettige Triglyceride, Polyoxyethylen-12-Cetylstearylalkohol, Oleyloleat, Propylenglycol, Menthol, Citronenöl, Parfümöl, Citronensäuremonohydrat, Alpha-Tocopherol, Palmitoylascorbinsäure, Natriumedetat, (2-Hydroxyethyl)salicylat als Konservierungsmittel

Aussehen, Geruch:

weiße homogene Salbe, Geruch höchstens schwach wahrnehmbar

Lagerbedingungen:

Dolo-Arthrosenex® M Salbe ist bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) zu lagern, Packung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Tube nach Gebrauch wieder fest verschließen.

Haltbarkeit: 2 Jahre

9. Lieferspezifikation

Tube mit 100 g Salbe, unverpackt in Faltschachtel

10. Hersteller / Vertreiber

Hersteller und Vertreiber des Medizinprodukts:

 Abanta Pharma GmbH
Reichsstraße 78
58840 Plettenberg

Telefon: +49 341 2582 190

Telefax: +49 341 2582 191

E-Mail: info@abanta-pharma.de

Hinweis:

Bitte Gebrauchsanweisung beachten

 Gebrauchsanweisung beachten

 Chargenbezeichnung/Chargennummer

 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
 Temperaturbegrenzung

 Hersteller


 Verwendbar bis


Stand der Information: November 2017



1142038/18



 kroha GmbH D- 39179 Barleben	000/0A E-Mail: SatzBA@Kroha.de Tel.: +49-(0)3 92 03-9 51-0
Kunde: LAW Services GmbH	Farbigkeit: 1/1-farbig
bitte zu Händen: Frau Kraus	Schwarz
Ihre Ident-Nummer: 1142038/18	-
Produktformat in mm: 210x180x0	-
-	-
Auftr.-Nr. letzter Korr.: A559593.00	-
1. Korrekturabzug	Mit freundlichen Grüßen i.A. Birgit Schurich

 kroha GmbH D- 39179 Barleben	Fax: +49-(0)3 92 03-9 51-30 ISDN: +49-(0)3 92 03-9 51-39	000/0A
Wir bitten Sie, diesen Korrekturabzug nach sorgfältiger Prüfung mit dem Manuskript zurückzugeben oder zurückzufaxen. Für nicht berichtete Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Der Abzug ist für Druckausführung, Format und Bedruckstoff nicht maßgebend.		
<input type="checkbox"/> druckreif		
<input type="checkbox"/> nach Korrektur druckreif		
<input type="checkbox"/> nach Korrektur neuen Abzug	Datum	Unterschrift